



Franco&Fils



RN 7 - Zone Industrielle
58320 POUQUES LES EAUX

Tél: 03.86.68.83.22 Fax: 03.86.68.55.95
www.francofils.com - info@francofils.com

PROTCOLE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE SPECIAL COVID 19

Avant chaque nettoyage de la table, Débrancher le câble d'alimentation de la table

Le Nettoyage doit s'effectuer table à vide, sans patient sur la table.
Utiliser des gants à usage unique pour nettoyer la Table

Utiliser 2 chiffons distincts et identifiables :
(les dissocier avec un marquage ou par une couleur différente)

- **Un chiffon sec sec pour le châssis** *(partie située sous le capitonnage qui n'est pas au contact avec le patient)*
 - Utiliser ce chiffon sec pour nettoyer le châssis.
 - Vérifier régulièrement l'état de propreté du châssis et du piston de chaque vérin électrique équipant votre table :
 - nettoyage de la tige chromée du vérin électrique de Montée/descente de la table avec un chiffon
- **Un chiffon pour le capitonnage de la table**
Le revêtement de la table doit être nettoyé **uniquement avec de l'eau savonneuse**.
A proscrire l'emploi de produit détergent ou alcoolisé.
Ne pas Utiliser de produit alcoolisé sur le skaï car cela abimerait le revêtement.

FRÉQUENCE : Nettoyage régulier du capitonnage à effectuer entre chaque patient

Par précaution : Jeter le chiffon du capitonnage à l'issue de chaque séance de nettoyage pour éviter une contamination.

- Lorsque la table n'est pas utilisée pendant une longue période, débrancher la prise d'alimentation et protéger la table par une couverture, une bâche de protection contre la poussière.

Pensez à rebrancher le fil d'alimentation du vérin.