

MANUEL D' UTILISATION



AVANCEE D'ESPALIER PF1-180

FRANCO & Fils sa CONSTRUCTEUR

ZI – RN7

58320 POUQUES LES EAUX

Tél : 03-86-68-83-22 - Fax : 03-86-68-55-95

www.francofils.com

infos@fancofils.com

FRANCO & FILS

FABRICATION D'APPAREILS PARA-MÉDICAUX

S.A. Capital 43 200 € - R.C. Nevers B 6911880454



Zone Industrielle - R. N. 7
58320 POUQUES-LES-EAUX
Tél. 03 86 68 83 22
Fax 03 86 68 55 95
Site : www.francofils.com
E.mail : info@francofils.com

Licence
Mécanothérapie
Pouliothérapie
Ergothérapie



N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 66691880454 - APE 331 B

DECLARATION CE DE CONFORMITE



AVANCEE D'ESPALIER PF1-180

Je soussigné, Monsieur FRANCO Pierre, P.D.G. de la société FRANCO & Fils, Zone Industrielle RN7 - 58320 POUQUES LES EAUX, assure et déclare que ce dispositif satisfait aux dispositions qui leur sont applicables.

à Pougues Les Eaux, le 16/12/2014

Mr Pierre FRANCO
P.D.G.

DESCRIPTIF

FONCTION : Appareil destiné dans le domaine de la pouliothérapie pour accrocher différents accessoires (poulies, tendeurs, poids...) et pouvant être fixé sur un espalier à hauteur désirée.

NOM COMMERCIAL : FRANCO & Fils

UTILISATION : Permet à un praticien de suspendre et accrocher des accessoires nécessaires à des travaux de rééducation en matière de pouliothérapie.

DESTINATION : Kinésithérapeutes – Centres de rééducation
Hôpitaux – Médecins

Durée d'utilisation : utilisation temporaire pendant moins de 60 minutes.

Critères utilisés pour les règles de classification :
définies par l'annexe IX du livre V bis

CLASSIFICATION: CLASSE 1

Règle 1 (Règle de classification de l'Annexe II) : Dispositif non invasif

Date de 1^{ère} mise en fabrication : 1955

CLASSE GNDM : 13570 **Shield, wound**

Date de 1^{ère} mise en fabrication : 1960

NOS EXIGENCES DE FABRICATION :

Chaque dispositif médical fabriqué par nos soins est conçu et fabriqué de manière à ne pas compromettre la sécurité des patients et la santé des utilisateurs, ou de toute autre personne étrangère à l'utilisation proche de ce dispositif médical.

Chaque dispositif médical FRANCO s'intègre dans la classification internationale des Dispositifs Médicaux.

Conjuguant notre savoir faire au soin apporté au choix des matériaux, ainsi qu'à la qualité de fabrication et de finition, chaque dispositif médical FRANCO&Fils répond aux besoins de praticiens exigeants, et assurera un confort optimal pour votre patient.

Chaque appareil livré comporte un numéro de série précisant le mois, l'année de fabrication ainsi que la référence du produit.

Une carte de garantie est livrée avec chaque appareil accompagné d'une notice d'utilisation.

Caractéristiques :

Dimensions : Long :0,74 m x prof : 0,78 m x haut : 0,58 m

Grillage à double torsade

Poids : 35 kg

Finition : poudre polyester époxy blanc cuite au four à 200°C

Cette avancée vous est livrée et démontée, comprenant :

- 1 panneau grillagé mécano soudé
- 2 supports tubulaires cintrés à visser au cadre grillagé
- 4 vis H, M12x60 + 4 rondelles crantées

MONTAGE :

Positionner les supports tubulaires cintrés en veillant à ce que le bord droit soit positionné du côté des crochets.


Faire coïncider les orifices avec ceux du panneau grillagé.

Présenter ensuite les vis, la tête par le dessus du panneau.

Vérifier que les supports d'accroche sont en appui avec le panneau grillagé

Visser les vis H, M12 à fond.

Puis vous pouvez accrocher cette avancée sur l'un des barreaux de votre espalier en vérifiant le bon aplomb.

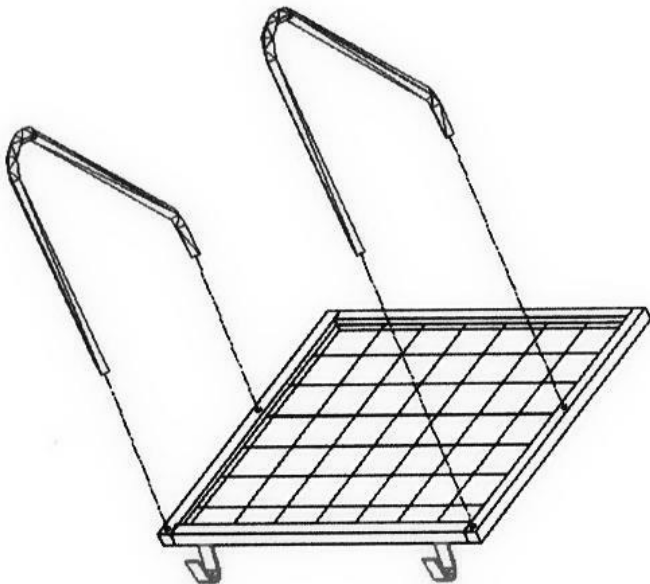

ENTRETIEN

A proscrire toute utilisation de produit détergent ou alcoolisé.

Pour un entretien régulier de cette avancée, nous vous recommandons l'emploi d'un chiffon sec pour nettoyer les différents équipements.

REGLES DE SECURITE

Toujours vérifier que votre avancée est bien en appui sur un barreau d'espalier.

L'appareil n'est pas prévu pour supporter des charges supérieures à 50 kg au total par risque d'endommager le panneau grillagé et les accroches.

Ne pas se suspendre à l'avancée d'espalier.

Ne jamais se suspendre au panneau grillagé : l'avancée est prévue pour suspendre des accessoires de pouliothérapie.

Toujours vérifier l'aplomb de l'avancée et que les 4 vis ne se sont pas desserrées.

ENGAGEMENTS - GARANTIES

Les éléments et descriptions techniques présents dans ce manuel sont à titre contractuel. La société FRANCO & Fils se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques de ses appareils médicaux à fin d'améliorations techniques, et cela sans préavis.

Les indications figurant dans ce livret sont des données relatives aux dispositifs fabriqués et commercialisés de série, et certaines modifications pourraient être constatées d'une version à fin d'améliorations techniques.

Nous dégageons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir si les consignes d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées.

La société FRANCO & Fils ne sera pas tenue pour responsable des dommages causés par le non-respect des règles de sécurité et recommandations particulières.

Toute intervention ou modification technique sur ce matériel est interdite sans l'accord écrit du fabricant et dégageant totalement sa responsabilité, de même pour toute pièce d'origine étrangère à notre fabrication.

GARANTIE 3 ANS